



AM PEX

Calcium Hydroxide Paste With Iodoform
Dental Root Canal Filling Material



خمیر کلسیم هیدروکساید Ampex آماده مصرف و از پیش ترکیب شده با یدوفرم است. افزودن یدوفورم به ترکیب خمیر کلسیم هیدروکساید موجب بهبود رادیوپاسیته و ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در خمیر میشود.

این محصول با فرمول خاص و پایه روغنی به ماندگاری طولانی مدت در کانال ریشه کمک کرده و استفاده از آن را به عنوان پرکننده دندان شیری پس از پالپکتومی امکانپذیر می کند.

موارد استفاده:

پرکننده دندان شیری

پالپ کپ و پالپوتومی

ماده پرکردگی موقت ریشه بزرگسالان

ایجاد سد بافت سخت

این محصول فقط برای کاربرد دندان، توسط دندانپزشکان طراحی شده است.

از استفاده محصول برای بیمارانی که به اجزا تشکیل دهنده آن حساسیت دارند پرهیز نمایید.

در مورد استفاده برای بزرگسالان از باقی ماندن آن بیش از مدت یک ماه پرهیز کنید.

این خمیر در مجاورت هوا خشک میشود پس از استفاده درب سرنگ را ببندید با این کار طول عمر محصول افزایش می یابد.

لطفا در دمای ۲۵-۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود. نگهداری در یخچال در مناطق گرمسیری به طول عمر بیش تر محصول کمک میکند